



Programmi per l'uso estetico - benessere

CE

IT

MyMed
PROFESSIOINAL MAGNETOLIGHT



Programmi Estetici-Benessere ULTRAROSSO

i Informazioni

È consigliabile, dove possibile, l'uso del diffusore MAF insieme o in alternativa al diffusore Magneto Light.

Uso degli accessori per trattamenti ULTRAROSSO

OPZIONALE


**Manipolo Ultrarosso**

OPZIONALE

**Diffusore Ultrarosso**

PATOLOGIA	
PROGRAMMA ULTRAROSSO	
POTENZA	100%
FREQUENZA	100 HZ
DURATA	15 Minuti
PROGRAMMA	109

Per trattare dolori acuti e fibromialgia.

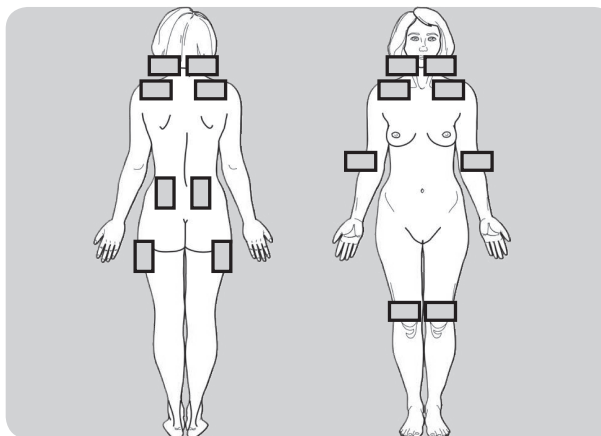

PROGRAMMA LIBERO ULTRAROSSO

L'apparecchio è dotato di 1 programma ultrarosso supplementare modificabile, posto al programma numero **108**, applicabile nella sezione destra. Selezionando il programma libero e spingendo insieme i pulsanti "+" e "-" si entra nella situazione **EDIT** in cui si possono modificare i parametri a di **DURATA**, **FREQUENZA** e **POTENZA**. Con i pulsanti "+" e "-" si cambiano i valori da assegnare ai parametri mentre con i pulsanti "PROGRAMS ▲ / ▼" si selezionano i parametri da modificare. Premere **START/STOP** per memorizzare le impostazioni.

I parametri modificabili sono:

- **DURATA** da 1" a 59" MINUTI
- **FREQUENZA** da 1 Hz a 100 Hz
- **POTENZA** da 1% a 100%



Programmi Estetici-Benessere MAF & MAGNETOLIGHT

Informazioni

È consigliabile, dove possibile, l'uso del diffusore MAF insieme o in alternativa al diffusore Magneto Light.

Uso degli accessori per trattamenti MAF e Magneto Light

OPZIONALE



Diffusore magnetoterapia alta frequenza (MAF)

Questi accessori opzionali possono essere usati in qualunque programma al posto del diffusore MAF normalmente utilizzato:




• Materassino MAF

La stuoia di solito viene posizionata sotto il lenzuolo del letto o su di una poltrona per permettere una comoda terapia a coloro che avessero bisogno di un'azione più prolungata.



• Fascia cervicale MAF

Accessorio utile per il trattamento di collo e cervicale.

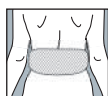


• Fascia lombare MAF

Accessorio utile per il trattamento della zona lombare.



• Gilet MAF

Questo accessorio di solito viene usato per chi soffre di problemi al tronco (bacino, schiena, cervicale, etc.).

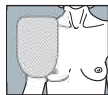


• Fascia spalla/ginocchio/gomito MAF

Accessorio multifunzionale utile per il trattamento di zone differenti del corpo.



• Fascia facciale MAF

Un accessorio utile per il trattamento del viso.

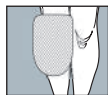

OPZIONALE



• Rilevatore MAF

È un dispositivo per la verifica del corretto funzionamento dei generatori di campi elettromagnetici ad alte frequenze per magnetoterapia. Si utilizza sondando l'accessorio (materassino, fascia...) collegato al dispositivo MAF in funzione.

OPZIONALE



Diffusore Magneto Light



Testina Magneto Light

• Diffusore Magneto Light / Testina

Accessori utili per quelle forme di dolore acuto/cronico molto fastidioso; per la forte concentrazione di energia elettromagnetica sul manipolo si consiglia un tempo massimo di 15 minuti per 20 sedute.

MYMED PROFESSIONAL MAGNETOLIGHT




PATOLOGIA

ASMA BRONCHIALE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	36 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	63 - 67 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ

PROGRAMMA	02
-----------	----

Per ridurre le difficoltà respiratorie con spasmi, congestione e ipersecrezione dei bronchi.

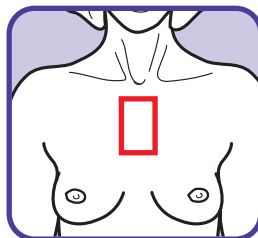


PATOLOGIA

DOLORI MESTRUALI

INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	22 - 27 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ

PROGRAMMA	10
-----------	----

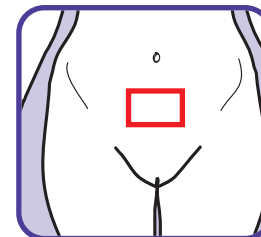


PATOLOGIA

AZIONE ANTI - AGE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	24 - 30 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	70 - 76 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ

PROGRAMMA	04
-----------	----

Per alleviare gli effetti dell'invecchiamento dei tessuti, soprattutto nella zona viso - collo.

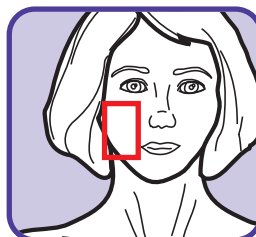


PATOLOGIA

EDEMA POSTFLEBITICO

INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	24 - 30 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ

PROGRAMMA	13
-----------	----

Per diminuire i dolori dovuti a infiammazioni venose localizzate.

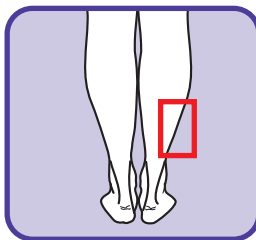


PATOLOGIA

ENFISEMA POLMONARE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	28 - 31 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ

PROGRAMMA	15
-----------	----

Per calmare i dolori dovuti alla dilatazione degli alveoli polmonari.

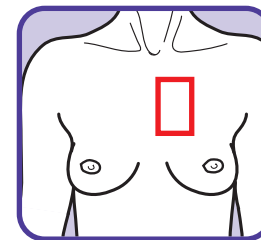


PATOLOGIA

EDEMA TIBIALE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	28 - 30 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ

PROGRAMMA	14
-----------	----

Per favorire il riassorbimento di edemi nella zona della tibia.

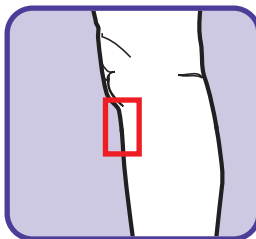

MYMED PROFESSIONAL MAGNETOLIGHT




PATOLOGIA

FUOCO DI SANT'ANTONIO

INTENSITÀ MAGNETICA LF	27 - 34 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	68 - 74 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ

PROGRAMMA	18
-----------	----

Per alleviare i bruciori causati dalla malattia della cute di origine virale.

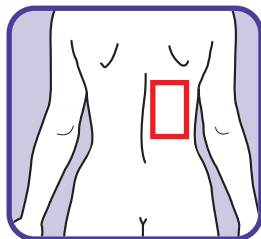


PATOLOGIA

LINFEDEMA POSTMASTECTOMIA

INTENSITÀ MAGNETICA LF	22 - 28 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ

PROGRAMMA	20
-----------	----

Per mitigare i problemi dovuti all'intervento di mastectomia riguardanti la scarsa irradiazione degli arti superiori.

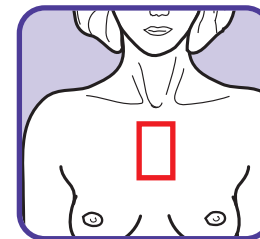


PATOLOGIA

LACERAZIONE PELLE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	22 - 27 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	38 - 42 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ

PROGRAMMA	19
-----------	----

Per aiutare a rigenerare la cute sui tagli senza lasciare cicatrici.

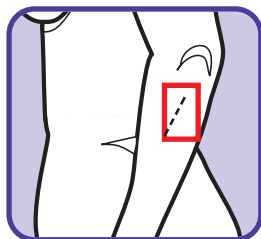


PATOLOGIA

MORBO DI RAYNAUD

INTENSITÀ MAGNETICA LF	13 - 16 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	24 - 30 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ

PROGRAMMA	22
-----------	----

Per alleviare i dolori dovuti a difetti circolatori localizzati soprattutto alle dita della mano.

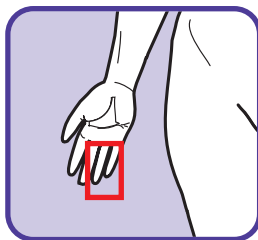


PATOLOGIA

POLIARTRITE REUMATOIDE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	37 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	70 - 76 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	1000 - 10000 HZ

PROGRAMMA	25
-----------	----

Per calmare i dolori dovuti ad infiammazione cronica e contemporanea di più articolazioni.

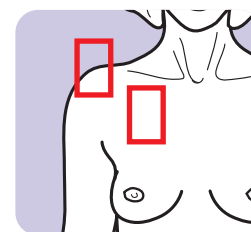


PATOLOGIA

PERIARTRITE SCAPLOMERALE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	35 - 41 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	10 - 16 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	1000 - 10000 HZ

PROGRAMMA	24
-----------	----

Per calmare i dolori dovuti ad infiammazione dei muscoli e tendini dell'omero.

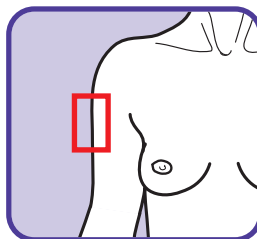

MYMED PROFESSIONAL MAGNETOLIGHT




PATOLOGIA

POSTUMI DA RASCHIAMENTO

INTENSITÀ MAGNETICA LF	35 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 1000 HZ

PROGRAMMA	26
-----------	----

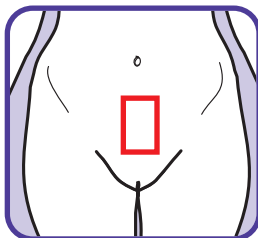


PATOLOGIA

TRATTAMENTO ACNE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	24 - 27 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	70 - 77 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 Hz

PROGRAMMA	30
-----------	----

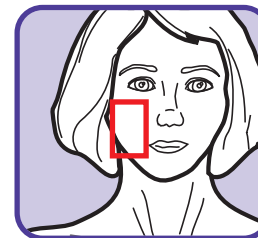

Per ridurre le alterazioni della pelle con pustole dovute a infiammazioni dei bulbi piliferi.

PATOLOGIA

PROGRAMMA UNIVERSALE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	20 - 50 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 80 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ

PROGRAMMA	27
-----------	----


Per trattare patologie non comprese negli altri programmi. Meno specifico e più generico, copre l'intero spettro di frequenze e potenze disponibili sulla macchina. **Il trattamento si interrompe con lo spegnimento dell'apparecchio.**

PATOLOGIA

RIGENERAZIONE TESSUTI CUTANEI

INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	77 - 84 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ

PROGRAMMA	28
-----------	----

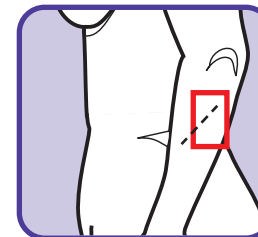

Per aiutare a ricostruire il tessuto lesso favorendo un'azione antibatterica.


PATOLOGIA

TRATTAMENTO ACUFENI

INTENSITÀ MAGNETICA LF	30 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 Hz

PROGRAMMA	31
-----------	----

Per ridurre la sensazione di fischi e ronzii alle orecchie.

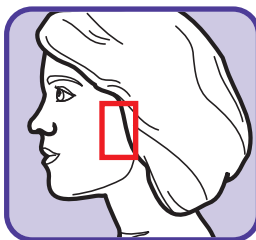


PATOLOGIA

TRATTAMENTO ASTENIA

INTENSITÀ MAGNETICA LF	30 - 37 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	46 - 53 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 1000 HZ

PROGRAMMA	35
-----------	----

Per eliminare la sensazione di spossatezza da indebolimento dell'organismo.

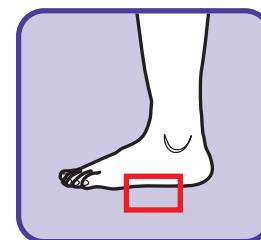


PATOLOGIA

TRATTAMENTO ANTIRUGHE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	20 - 24 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	10 - 16 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ

PROGRAMMA	33
-----------	----

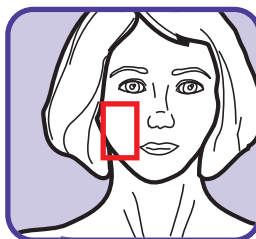


MYMED PROFESSIONAL MAGNETOLIGHT

PATOLOGIA

TRATTAMENTO BRONCHITE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	32 - 34 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	14 - 20 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ

PROGRAMMA	38
-----------	----

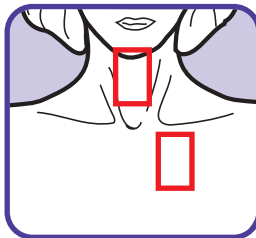


PATOLOGIA

TRATTAMENTO CELLULITE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	35 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 28 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ

PROGRAMMA	40
-----------	----

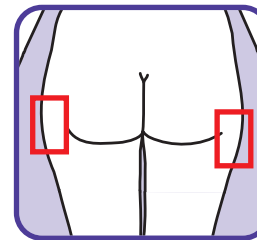


Per ridurre l'infiammazione del tessuto connettivo con conseguente deposito eccessivo di adipi.

PATOLOGIA

TRATTAMENTO CEFALEA

INTENSITÀ MAGNETICA LF	25 - 33 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	47 - 53 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 2000 HZ

PROGRAMMA	39
-----------	----

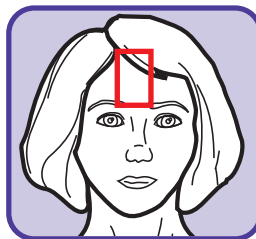


PATOLOGIA

TRATTAMENTO CERVICALE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	36 - 43 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	42 - 53 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 3000 HZ

PROGRAMMA	41
-----------	----

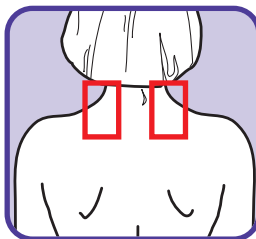


Per diminuire il dolore da artrosi cervicale che spesso provoca pericolosi capogiri.

PATOLOGIA

TRATTAMENTO CONTUSIONI

INTENSITÀ MAGNETICA LF	30 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ

PROGRAMMA	43
-----------	----

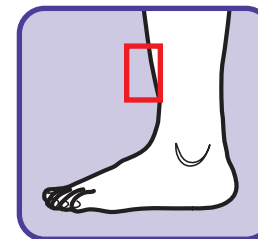


PATOLOGIA

TRATTAMENTO COLITI

INTENSITÀ MAGNETICA LF	38 - 44 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 1000 HZ

PROGRAMMA	42
-----------	----

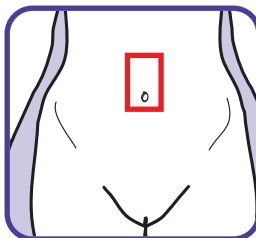


MYMED PROFESSIONAL MAGNETOLIGHT

PATOLOGIA

TRATTAMENTO DERMATITI

INTENSITÀ MAGNETICA LF 26 - 32 G
 FREQUENZA MAGNETICA LF 70 - 77 HZ
 FREQUENZA MAGNETICA HF 500 - 5000 HZ

PROGRAMMA 44

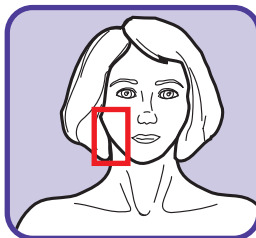


PATOLOGIA

TRATTAMENTO FARINGITE

INTENSITÀ MAGNETICA LF 25 - 28 G
 FREQUENZA MAGNETICA LF 10 - 16 HZ
 FREQUENZA MAGNETICA HF 500 - 10000 HZ

PROGRAMMA 49

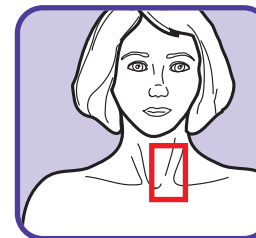


PATOLOGIA

TRATTAMENTO EMATOMI

INTENSITÀ MAGNETICA LF 30 - 32 G
 FREQUENZA MAGNETICA LF 20 - 26 HZ
 FREQUENZA MAGNETICA HF 500 - 10000 HZ

PROGRAMMA 47

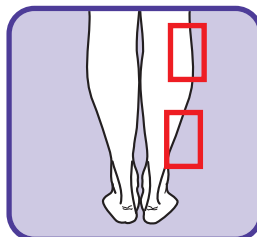


PATOLOGIA

TRATTAMENTO FISTOLE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	18 - 22 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	76 - 83 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ

PROGRAMMA	50
-----------	----

Per aiutare a rimarginare le lesioni di origine traumatica o patologica con secrezione di pus.

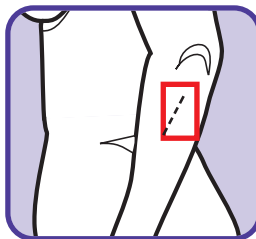


PATOLOGIA

TRATTAMENTO FORMICOLIO

INTENSITÀ MAGNETICA LF	25 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	38 - 43 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ

PROGRAMMA	52
-----------	----

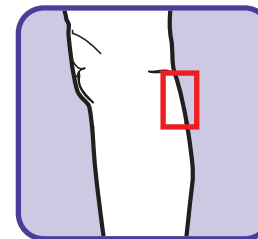


PATOLOGIA

TRATTAMENTO FLEBITI

INTENSITÀ MAGNETICA LF	28 - 31 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	80 - 88 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ

PROGRAMMA	51
-----------	----

Per ridurre il processo infiammatorio acuto o cronico che interessa i vasi venosi.

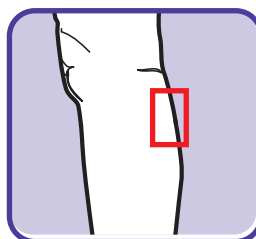

MYMED PROFESSIONAL MAGNETOLIGHT




PATOLOGIA

TRATTAMENTO FOTODERMITI

INTENSITÀ MAGNETICA LF	25 - 28 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	70 - 76 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ

PROGRAMMA	53
-----------	----

Per calmare gli effetti dovuti ad una esagerata sensibilità alla luce solare.

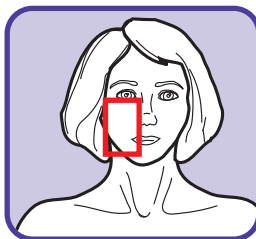


PATOLOGIA

TRATTAMENTO GENGIVITI

INTENSITÀ MAGNETICA LF	28 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	46 - 53 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ

PROGRAMMA	55
-----------	----

Per diminuire le infiammazioni a danno delle gengive.

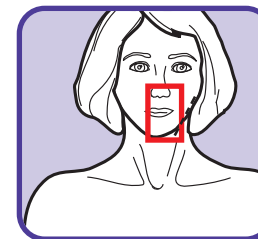


PATOLOGIA

TRATTAMENTO GASTRITI

INTENSITÀ MAGNETICA LF	36 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	50 - 56 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 1000 HZ

PROGRAMMA	54
-----------	----

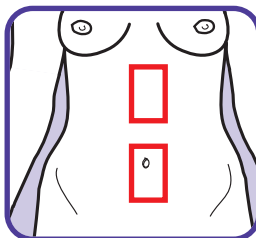


PATOLOGIA

TRATTAMENTO GONARTROSI

INTENSITÀ MAGNETICA LF	36 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	50 - 56 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	1000 - 5000 HZ

PROGRAMMA	56
-----------	----

Per calmare i dolori dovuti ad artrosi del ginocchio.

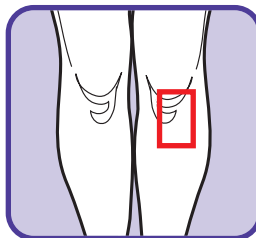


PATOLOGIA

TRATTAMENTO HERPES ZOSTER

INTENSITÀ MAGNETICA LF	36 - 44 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	24 - 30 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 3000 HZ

PROGRAMMA	59
-----------	----

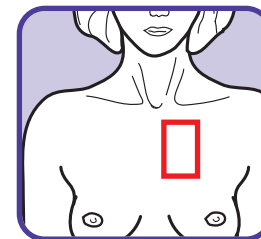


PATOLOGIA

TRATTAMENTO HERPES SIMPLEX

INTENSITÀ MAGNETICA LF	36 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	24 - 30 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 3000 HZ

PROGRAMMA	58
-----------	----

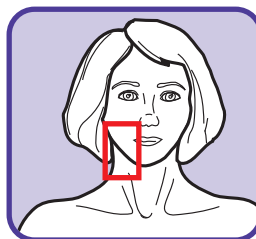

MYMED PROFESSIONAL MAGNETOLIGHT




PATOLOGIA

TRATTAMENTO IMPOTENZA

INTENSITÀ MAGNETICA LF	28 - 30 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 1000 HZ

PROGRAMMA	60
-----------	----

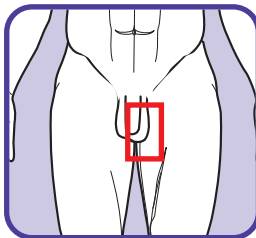


PATOLOGIA

TRATTAMENTO LARINGITE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	15 - 18 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	10 - 16 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ

PROGRAMMA	63
-----------	----

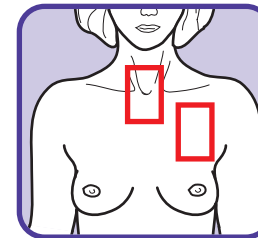


PATOLOGIA

TRATTAMENTO IPOTENSIONE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	20 - 27 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	50 - 56 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 1000 HZ

PROGRAMMA	61
-----------	----

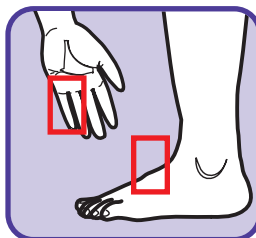

Per contrastare la riduzione del sangue arterioso nel circolo causa di piedi e mani fredde.


PATOLOGIA

TRATTAMENTO LINFANGITE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	20 - 25 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ

PROGRAMMA	64
-----------	----

Per mitigare i dolori dovuti ad infiammazione dei vasi linfatici.

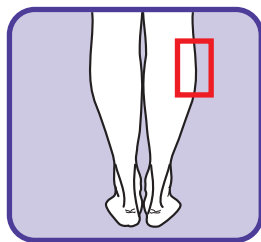


PATOLOGIA

TRATTAMENTO LOMBOSCIATALGIA

INTENSITÀ MAGNETICA LF	36 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	40 - 46 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	1000 - 10000 HZ

PROGRAMMA	66
-----------	----

Per alleviare i dolori che si irradiano dalla zona lombare e proseguono lungo il nervo sciatico.

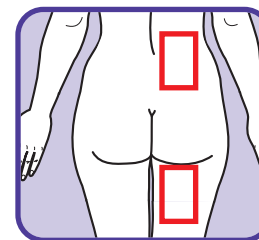


PATOLOGIA

TRATTAMENTO LINFEDEMA

INTENSITÀ MAGNETICA LF	18 - 23 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ

PROGRAMMA	65
-----------	----

Per alleviare i dolori dovuti ad accumulo di linfa nei vasi linfatici.

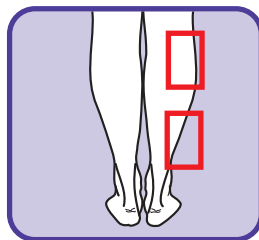

MYMED PROFESSIONAL MAGNETOLIGHT




PATOLOGIA

TRATTAMENTO NEVRALGIE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	37 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	77 - 82 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 3000 HZ

PROGRAMMA	68
-----------	----

Per alleviare un dolore acuto causato dall'irritazione dei nervi trigemino, sciatico, eccetera.

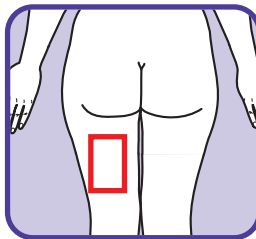


PATOLOGIA

TRATTAMENTO OTITE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	17 - 24 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	52 - 57 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ

PROGRAMMA	71
-----------	----

Per calmare le infiammazioni dell'orecchio medio e di quello esterno.

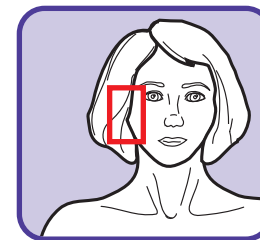


PATOLOGIA

TRATTAMENTO NEVRITE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	24 - 30 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ

PROGRAMMA	69
-----------	----

Per calmare l'infiammazione dei nervi in particolari distretti corporei.

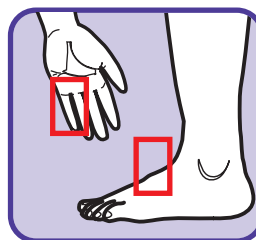


PATOLOGIA

TRATTAMENTO PIAGHE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	20 - 26 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	61 - 67 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ

PROGRAMMA	72
-----------	----

Per aiutare a rimarginare le ustioni e le lesioni profonde della cute senza lasciare cicatrici.

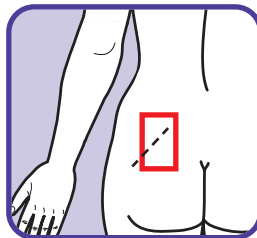


PATOLOGIA

TRATTAMENTO PROSTATOCISTITE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	38 - 44 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ

PROGRAMMA	74
-----------	----

Per alleviare i dolori dovuti all'infiammazione della ghiandola prostatica.

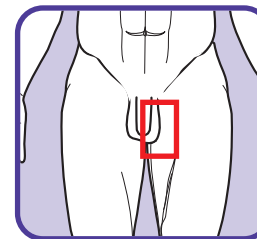


PATOLOGIA

TRATTAMENTO PROSTATITE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	18 - 22 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ

PROGRAMMA	73
-----------	----

Per diminuire i dolori dovuti all'infiammazione della ghiandola prostatica.

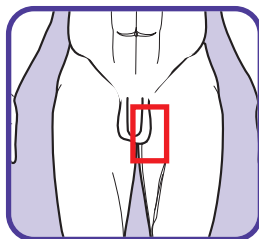

MYMED PROFESSIONAL MAGNETOLIGHT




PATOLOGIA

TRATTAMENTO PSORIASI

INTENSITÀ MAGNETICA LF	23 - 29 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	70 - 76 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ

PROGRAMMA	75
-----------	----

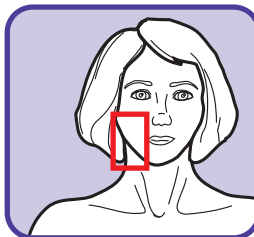


PATOLOGIA

TRATTAMENTO SINUSITI

INTENSITÀ MAGNETICA LF	46 - 52 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	10 - 16 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ

PROGRAMMA	80
-----------	----

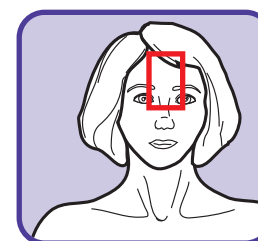


PATOLOGIA

TRATTAMENTO RINITI

INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 34 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	10 - 16 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ

PROGRAMMA	77
-----------	----

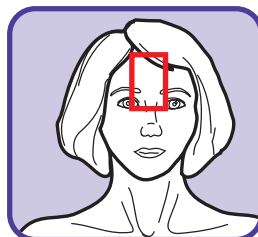


Per calmare il processo infiammatorio della mucosa nasale anche se di tipo allergico.

PATOLOGIA

TRATTAMENTO SMAGLIATURE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	30 - 38 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	44 - 52 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ

PROGRAMMA	81
-----------	----

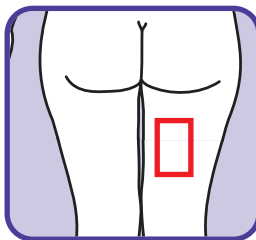


PATOLOGIA

TRATTAMENTO TONSILLITI

INTENSITÀ MAGNETICA LF	18 - 26 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	12 - 15 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ

PROGRAMMA	85
-----------	----

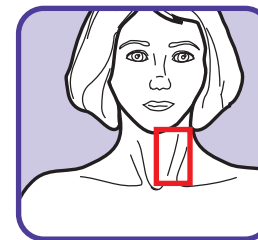


Per placare le infiammazioni acute a carico delle tonsille palatine.

PATOLOGIA

TRATTAMENTO TENDINITE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	36 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	70 - 76 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	1000 - 10000 HZ

PROGRAMMA	84
-----------	----

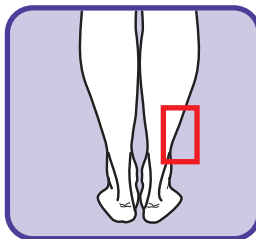

Per diminuire le infiammazioni del tendine, cioè del cordone che salda il muscolo all'osso.

MYMED PROFESSIONAL MAGNETOLIGHT




PATOLOGIA

TRATTAMENTO TRACHEOBRONCHITE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	32 - 34 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ

PROGRAMMA 87

Per placare i dolori dovuti ad infiammazione della trachea e dei bronchi..

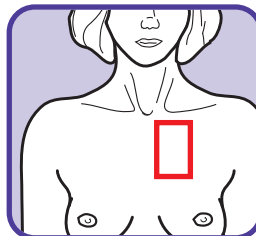


PATOLOGIA

TRAUMA ORECCHIO

INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 1000 HZ

PROGRAMMA 88

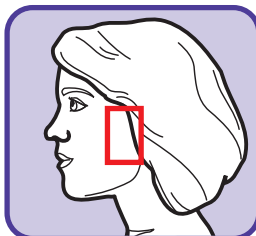


PATOLOGIA

ULCERA DA DECUBITO

INTENSITÀ MAGNETICA LF	46 - 52 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	76 - 83 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ

PROGRAMMA 89

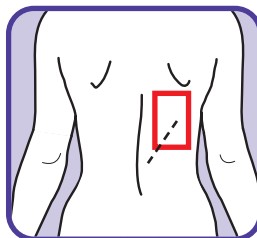


Per calmare i dolori causati dalle ulcerazioni dovute da una prolungata permanenza a letto.

PATOLOGIA

ULCERA DUODENALE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 1000 HZ

PROGRAMMA 90

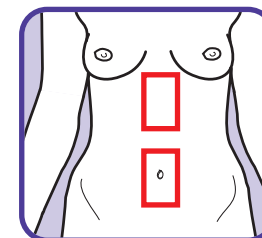


PATOLOGIA

ULCERA GASTRICA

INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 30 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 1000 HZ

PROGRAMMA 91

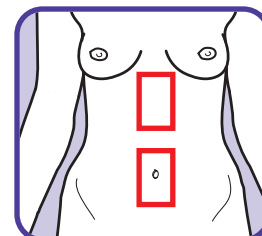


PATOLOGIA

VENE VARICOSE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	18 - 27 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	42 - 48 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ

PROGRAMMA	92
-----------	----

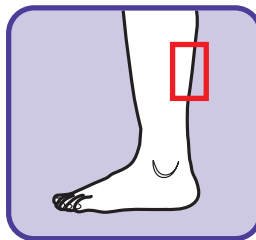

Per ridurre la dilatazione delle vene e dei vasi linfatici.

PATOLOGIA

V-MAGNETO LIGHT PLUS FORTE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	150 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 80 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	1000 - 10000 HZ

PROGRAMMA	102
-----------	-----

Programmi Estetici

FOTOCATALISI - LUCE PULSATA

AZIONE

AZIONE ANTIAGE	93
MACCHIE DELLA PELLE	94
RIGENERAZIONE TESSUTI CUTANEI	95
TRATTAMENTO ACNE	96
TRATTAMENTO ANTIRUGHE	97
TRATTAMENTO CELLULITE	98
TRATTAMENTO COUPEROSE	99
TRATTAMENTO SMAGLIATURE	100
VENE VARICOSE	101
V-MAGNETO LIGHT PLUS FORTE	102

I trattamenti a Luce Pulsata possono risolvere molti problemi della cute come: acne, macchie, couperose, rosacea e invecchiamento della pelle. I trattamenti di Fotocatalisi-Luce Pulsata rappresentano l'evoluzione della dermatologia moderna.



NOTE

[illegible]



NOTE



Stampato in Italia

myMed
PROFESSIONAL MAGNETOLIGHT